


# DESINFECT'AIR ET SURFACES ONE SHOT

## AÉROSOL DÉSINFECTANT PUISSANT ET DÉSODORISANT

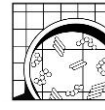

Grand  
volume  
2400m<sup>3</sup>

► Désinfectant de contact des surfaces et des tissus (mobilier, appareils, tables d'examen, chariots, poignées, matelas, rideaux, literies, couvertures, chaussures).

► Spécialement conçu pour traiter des grands volumes, jusqu'à 2400m<sup>3</sup>.

► Excellent pouvoir de désodorisation : stoppe la source du développement des microorganismes.

► Pulvérisation sèche sans retombées.

► Agréable odeur de menthe.

### LIEUX D'UTILISATION

Ecoles, réfectoires, cabinets médicaux, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite, ...) : après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, cuisines, hall d'hôtel, ...

### NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes de désinfection en conditions de saleté à 20°C :

Bactéricide : EN 1276 et EN13697 en 5 min.

Levuricide : EN13697 en 15 min.

Fongicide : EN1650 et EN13697 en 15 min.

Actif sur *vaccinia virus* (virus enveloppé) selon EN14476 en 15 min à 20°C (conditions de saletés).

### MODE D'EMPLOI

S'utilise hors présence humaine et animale. Ranger les aliments. Interdire l'accès du local.

Placer l'aérosol au centre de la pièce et un peu en hauteur. Déclencher l'aérosol en enfonçant la languette du diffuseur à fond.

Sortir immédiatement de la pièce et laisser l'aérosol se vider complètement. Temps de diffusion = 8 minutes.

Laisser agir environ 15 minutes et aérer la pièce. Le port de masque et de lunettes est recommandé pour se prémunir de toute projection accidentelle lors de la mise en oeuvre.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).

Aspect : liquide fluide incolore.

Odeur : menthe.

Gaz propulseur : butane/ propane.

Volume net : 750 ml.

Substances actives : Éthanol (CAS n° 64-17-5) à 37.94% (m/m) et Chlorure de didécylidiméthylammonium, CAS n°7173-51-5 à 0,27% (m/m). Usage Biocide : TP2.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**EPI PRÉCONISÉS** : lunettes, masque.

FT1060004515333 – 0224 DESINFECT'AIR ET SURFACES ONE SHOT AERO

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez

**AT-PLUS**